

Version 1.1, daterad 2024-04-19



Bruksanvisning Posifon Zembro

Posifon Zembro är ett armbandsur som tillsammans med tjänsten PosifonCare är designad för att öka användarens trygghet och självständighet. Posifon Zembros främsta funktion är positionering med hög precision, den har även en larmknapp om man behöver påkalla hjälp.

Denna bruksanvisning ger enhetsspecifik information om produkten Posifon Zembro. Vid användande av produkten uppmanar vi användarna att också läsa bruksanvisningen för tillhörande IT-systemet PosifonCare.

I bruksanvisningen får du information om hur du hanterar enheten, så som laddning, funktioner, hur man larmar och allmän skötsel.

Läs igenom denna bruksanvisning innan användning och följ beskrivna riktlinjer. Underlåtenhet att göra det kan innebära potentiell hälsofara eller produktfel.

Paketinnehåll

- Posifon Zembro
- Micro USB kabel
- Laddplatta
- Adapter

Extra tillbehör som finns utöver standard

- Låsbart spänne

Ladda din Posifon Zembro

Vid normal användning räcker batteriet vanligtvis mellan 1–2 dagar. Det tar 45 minuter att ladda enheten från 0–100%. Vi rekommenderar att enheten laddas dagligen för att säkerställa att batterikapacitet finns när funktionen verkligen behövs.



För att ladda din klocka, lägg den på laddplattan enligt bildinstruktionen. När den placeras på rätt sätt kommer en magnet att hålla klockan på plats och batterisymbolen i displayen på klockan indikerar att den laddas.

Zembro enheten ger även ifrån sig information när det är dags att ladda klockan. När batterinivån når 20% kommer ett lågt batterilarm att utlösa i PosifonCare, larmmottagarna kommer då få information att det är dags att ladda enheten. Klockans display visar information på skärmen när batteriet är lågt:

- En indikering när batterinivån är låg (20%), denna försvinner efter 30 sekunder och sedan påminner dig varje 10:e minut om att ladda.
- En indikering när batterinivån är mycket låg (10%). Klockan stängs av när batteriet faller till 2%



Starta Posifon Zembo

För att starta din klocka placera den på laddaren.

Stänga av Posifon Zembro

Det är inte möjligt att stänga av din klocka. Den kommer automatiskt att stängas av sig när batteriet tar slut.

Klockans knappar och funktioner

Tryck på knappen längst upp till vänster (1) för att lysa upp skärmen. Skärmen släcks efter 10 sekunder för att spara batteri.

Tryck på knappen överst till höger (2) för att kontrollera batterinivån. Tryck en gång till för att återgå till hemskärmen

Tryck och håll ner knappen längst ner till höger (3) i fem sekunder för att generera ett larm. När ett larm har genererats kommer klockan att vibrera och ge ifrån sig ett pipjud. Om du vill avbryta larmet håller du knappen nedtryckt i fem sekunder en gång till.



Att larma

Din enhet fungerar främst som en klocka med positionering men har också en inbyggd larmknapp.

För att generera ett larm, tryck på knappen längst ner till höger, under 5 sekunder, se bilden nedan.

En vibration och ljudsignal aktiveras när larmet är aktivt. Skärmen ändras från att visa aktuell tid till att visa en larmsymbol. Dina valda larmmottagare meddelas omedelbart att du har larmat.

När du larmar kommer en GPS-ikon att blinka på skärmen. Detta för att klockan hämtar positioner via GPS för att kunna förmedla vart du befinner dig. Om du rör på dig kommer en uppdaterad position skickas varje minut.



Lokalisering

Posifon Zembro använder sig av satellitnavigering via GPS-systemet. Noggrannheten i positionerna beror på förutsättningar där man befinner sig, såsom om man är ute under bar himmel mm. Under rätt förutsättningar är positionens noggrannhet bättre än 10 meter.

Inomhus kan enheten positionera sig via medföljande Bluetooth inomhusfyrar (bluetooth beacons). Det går även att köpa till fler inomhusfyrar som tillhör via vår hemsida eller support. Det är viktigt att koppla en position till inomhusfyrarna. Vänligen ring Posifon support för att säkerhetsställa att rätt position är angivet på fyrarna. Bluetooth-fyrarna har inbyggt batteri och behöver ingen separat strömförsörjning. Batteritiden på fyrarna är ungefär två år.

Hantering och rengöring av din klocka

Posifon Zembro är vattentät. Du kan bära den i duschen eller när du badar, och du kan rengöra den med varmt vatten och vanliga rengöringsmedel såsom diskmedel.

Skärmen är av härdat glas, men vi rekommenderar att du undviker slipdukar eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör skärmen.

Larmtyper som stöds av Posifon Zembro

Det finns flera larmtyper som stöds av Posifon Zembro och nedan preciseras dessa. Tänk på att alla inte är standard och behöver då aktiveras separat i PosifonCare under fliken 'Larminställningar' och 'Mobila Larmtyper' för att kunna dra nytta av funktionen.

Områdeslarm, lämnar	Användaren har lämnat det aktuella trygghetsområdet
Områdeslarm, ankommer	Användaren har ankommit i det aktuella trygghetsområdet
Aktivt larm, larmknapp nedtryckt	Användaren har tryckt på larmknappen
Manuellt larm av larm- mottagare, efter sökning	Larmmottagare har konstaterat att användaren bör uppsökas, detta efter en sökning
PosifonCare har ej haft kontakt med GPS-enhet	Enhet har inte kommunicerat med PosifonCare på angivet tidsintervall. Inaktivitetslarm kan indikera på att något är fel och ska tas på största allvar
GPS-enhet har lågt batteri	Batterinivån på enhet är under bestämd nivå. Enhet behöver laddas

Ett rörelselarm har utlösts

Enhet är inte i rörelse

Enheten har detekterat ett fall*

Enhet med fallsensor har detekterat ett fall

*kommer i en framtida uppdatering av enhetens mjukvara

Garanti

Posifon lämnar ett års garanti på Posifon Zembro och alla tillbehör om inget annat överenskommit. Denna garanti träder i kraft vid inköpsdatumet och gäller ett år framåt. Delar eller enheter som levereras som ersättning är antingen nya eller likvärdiga i prestanda med nya delar.

Ansvar

Posifon ansvarar inte för fel som uppstår genom felaktig användning och extern påverkan såsom yttre våld, stark värme eller kyla eller annan påverkan som inte kan anses rimlig med hänsyn till produktens tänkta användning.

Specifikationer

Mått: 53,2 × 45,0 × 12,75mm

Vikt: 30 gram

Vatten- och dammtålig: IP68

Positionering: GPS, Bluetooth

Mobilnätskommunikation: LTE-M

Laddtid: 45 minuter.

Batterityp: Litium-ion

Batteritid standby: upp till 5 dygn beroende på nätverksanslutningar.

Batteritid vid normal användning: 1-2 dygn

Positionsuppdatering utanför hemmet: varannan minut

Information om återvinning

Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser. Batteriet i Posifon Zembro är inbyggt och får ej avlägsnas.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för information om vad som gäller för inlämning och återvinning.



Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämja med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din Posifon Zembro.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din Posifon Zembro.
- Placera inte din Zembro nära öppen eld.
- Släng inte din Zembro i en brand. Batteriet kan explodera!
- Det är förbjudet att köra enheten i mikrovågsugn då det finns risk att brand uppstår inuti enheten.
- Försök inte att plocka isär Zembro, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med Zembro. De små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte byta ut ditt Posifon Zembro-batteri utan tillåtelse från Posifon.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din Zembro med hjälp av en certifierad dator eller adapter.

Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

Denna produkt tillverkas av Sony i Zembro.



nära samarbete med Safetrx och
Produkten är CE-märkt.

Övrigt

Posifon Zembro ska enbart användas tillsammans med originaltillbehör. Laddningsplatta, adapter och sladd finns att beställa från Posifon om de behöver ersättas.

Alla allvarliga tillbud som inträffat i samband med användning av produkten bör rapporteras till Posifon.

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

Kontakt:

Adress:	Posifon AB Sven Hultins Gata 9C, 412 58 Göteborg
Hemsida:	www.posifon.se
Tel. support:	031 360 87 70 (dagtid 8.00–17.00)
Mail support:	support@posifon.se